



Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!



CE

Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Pulver Extra Stark

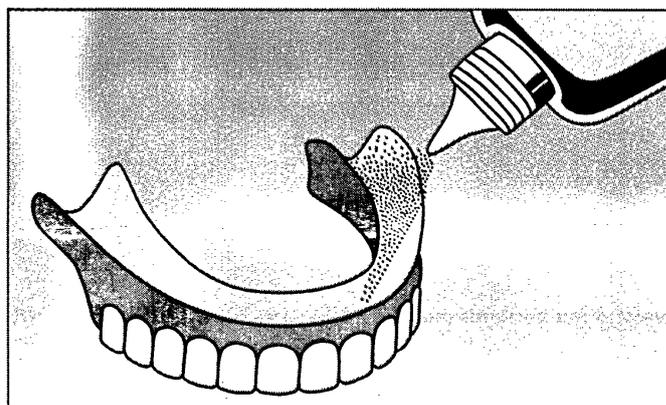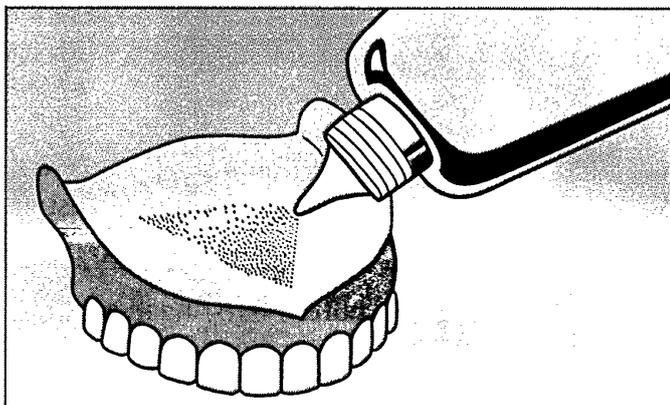

Anwendungsgebiet

Pulver als Haftmittel für Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung

Protefix® Haft-Pulver gleichmäßig dünn auf die angefeuchtete Prothese streuen. Die Gebissplatte sitzt nach dem Einsetzen sofort fest und haftet viele Stunden sicher im Mund. Sollte vorzeitig Lockerung eintreten – etwa durch Genuss von viel Flüssigkeit – so genügt es, Protefix® Haft-Pulver dünn nachzustreuen. Die Prothese sitzt sofort wieder fest.

Etwaige Rückstände lassen sich leicht mit Hilfe einer Zahnbürste unter fließendem Wasser von der Prothese abspülen. Besonders hartnäckige Haftmittelrückstände können mit einem speise-ölgetränkten Wattebausch entfernt werden. Zur Vermeidung einer zu großen Ausstoßmenge bitte die Flasche nicht zusammendrücken. Flasche schräg halten und leicht mit dem Zeigefinger antippen. Ein genaues Dosieren ist so möglich. Durch das Auftragen von zu viel Haftpulver kann sich dieses verhärten, wodurch das Risiko einer Mundschleimhautschädigung erhöht wird.

Zusammensetzung:

100 g Protefix® Haft-Pulver Extra-Stark enthalten:
Natriumalginat 100,0 g.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder des Gesamtorganismus beobachtet worden. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Zahnarzt auf.

Hinweise:

Die Anwendung von Protefix® Haft-Pulver sollte nur zeitweilig erfolgen. Eine anhaltend schlechte Haftung der Prothese ohne Haftpulver kann auf Abweichungen in ihrer Passgenauigkeit und Funktion zurückzuführen sein. In diesem Fall sollte der Arzt aufgesucht werden.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen. Bitte klären Sie dies mit Ihrem Zahnarzt ab.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Vertrieb in der Schweiz:
Biomed AG, CH-8600 Dübendorf


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.queisser.de

Bei Fragen, Problemen oder Anregungen zum Thema Haftmittel schreiben Sie an **Queisser Pharma, Protefix®** Beratungsteam, D-24914 Flensburg. Oder im Internet unter www.protefix.de.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie haben Sie Protefix® kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie Protefix® Haft-Pulver?

- mich überzeugt die Produktleistung
 andere Marken haben mich enttäuscht
 ich probiere **Protefix® Haft-Pulver Extra-Stark** gerade aus

Sind Sie mit der Haftkraft zufrieden?

- Ja Nein, weil _____

Verwenden Sie noch andere Protefix® Produkte?

- Ja, und zwar _____
 Nein

Ich bin _____ Jahre alt und verwende **Protefix® Haft-Pulver Extra-Stark** seit _____.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Information erhoben, verwendet und genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte mit Ausnahme von Tochtergesellschaften von Queisser Pharma ist ausgeschlossen.

Datum / Unterschrift _____

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an: Queisser Pharma, D-24914 Flensburg. Wir nutzen Ihre Angaben streng **vertraulich** zur ständigen Produkt-Verbesserung. Bei Anfragen Ihrerseits setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung. Wenn Ihnen die telefonische Beantwortung recht ist, geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an.

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____



Leiden Sie öfter unter schmerzhaften Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut oder Aphthen? Dafür gibt es **Protefix® Wund- und Schutzgel**

Protefix® Wund- und Schutzgel ist eine aktuelle Problemlösung aus der **Protefix®** Forschung. Es hilft bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut, Prothesen- und Zahnspangendruckstellen oder Aphthen mit einem neuartigen Wirkprinzip:

Sein patentierter Wirkstoff „TGO“ (oxydierte Glyceroltriestere) wird durch ein besonderes Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen und bildet bei der Anwendung einen Schutzschild, der – das ist das Neuartige! – selbst auf der Mundschleimhaut gut haftet.

- Er schützt die Wunde vor chemischen Reizen und dem mechanischen Druck der Prothese oder Zahnspange,
- lindert den Schmerz,



- fördert die Wundheilung.
- Kein Brennen oder Taubheitsgefühl auf der Mundschleimhaut.

Protefix® Wund- und Schutzgel gibt es nur in der Apotheke unter der PZN 2 651 753.